



Почти не требует времени



Слюноотсос и всасывающие шланги высокого давления

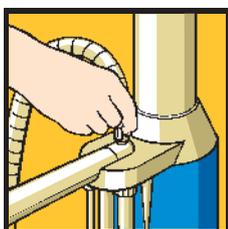


1. При необходимости прокачайте жидкость с помощью устройства KaVo AQUAmat.

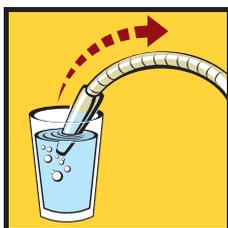


Если у вас нет устройства AQUAmat, при необходимости закачайте воду из подходящего контейнера с чистой водой.



2. Вставьте аспирационную канюлю в мерный колпачок и нажмите на колпачок 1 раз.

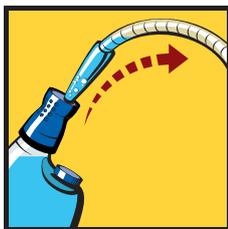

3. Прокачайте отмеренную дозу геля DEKASEPTOL через шланг и повторите шаги 1-3.

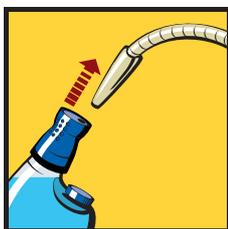

4. Вытащите шланг из мерного колпачка и верните его на стоматологическую установку.

Плевательница



1. Нажмите на мерный колпачок



2. Налейте отмеренную дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу.



3. Равномерно распределите гель DEKASEPTOL щеткой и оставьте на 5 минут.



4. Промойте плевательницу щеткой под проточной водой.

